


Regard® et Regard®UD

Solution d'entretien pour toutes les lentilles souples

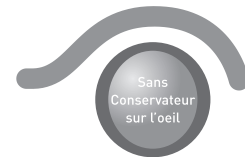

Regard® fait appel à une nouvelle technologie pour l'entretien des lentilles de contact.

Sa formule contient un décontaminant actif de nouvelle génération (Oxychlorite® system) qui se transforme dans l'œil en composants physiologiques des larmes (H₂O et NaCl) et libère de l'oxygène.

Cette nouvelle formule est optimisée afin d'éviter l'utilisation de conservateurs habituels qui, lors d'un usage à long terme, peuvent induire des effets allergisants et toxiques.

Regard® nettoie, rince, désinfecte, conserve et lubrifie les lentilles de contact souples.

Sa formulation permet aussi de prévenir les dépôts protéiques.

Composition :

Regard® est une solution stérile, isotonique et tamponnée contenant de l'eau purifiée, du chlorure de sodium, de l'acide borique, du poloxamer, de l'hydroxypropylméthylcellulose (0,15%), le complexe stabilisé Oxychlorite®.

Mode d'emploi :

- Toujours se laver puis se sécher les mains avec soin avant de retirer ses lentilles.
- Verser quelques gouttes de **Regard®** sur les lentilles de contact et masser délicatement la surface pour les nettoyer.
- Rincer les lentilles avec **Regard®** pour éliminer les dépôts.
- Poser les lentilles dans l'étui et le remplir avec la solution de **Regard®**.
- Laisser les lentilles dans la solution pendant au moins 6 heures pour les décontaminer et éliminer les dépôts protéiques.
- **Regard®** détruit les micro-organismes.
- **Regard®** peut être utilisé pour hydrater et lubrifier les lentilles avant la pose.
- Rincer l'étui avec **Regard®** après chaque utilisation et le laisser sécher à l'air.

Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser le produit si le flacon ou l'unidose sont endommagés.
- Utiliser de la solution **Regard®** neuve à chaque cycle de décontamination et jeter la solution après chaque usage.
- Éviter tout contact avec l'embout du flacon ou de l'unidose.
- Conserver le produit éloigné de toute source de chaleur et de la lumière du soleil.
- Flacon : après ouverture, la solution doit être utilisée dans les 90 jours (3 mois). Jeter toute solution restante après ce délai.
- Unidoses : ne jamais conserver l'unidose après ouverture.
- Comme pour tous produits de ce type, arrêter l'utilisation en cas d'irritation ou d'allergie à l'un des composants et consulter un spécialiste.
- **TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.**
- Ne pas avaler.

- LOT** Numéro de lot.
- Date de péremption.
- À usage unique.
- Veuillez vous référer à la notice.
- STERILE** Dispositif stérile traité par des techniques aseptiques
- Conserver à l'abri de la lumière du soleil

CE 0318 Date du marquage CE : **Regard®** 08/04/2002 • **Regard®** UD 18/10/2010

Regard®, Regard® UD et Oxychlorite® sont des marques de Vita Research. Brevets USA et Européens en cours.

Présentations :

Flacon de 60 ml – Code ACL : 34010 440 443-8 3

Flacon de 335 ml – Code ACL : 34010 791 304-0 2

Boîte de 10 UD – Code ACL : 34010 952 766-0 3

Boîte de 30 UD – Code ACL : 34010 952 767-7 1

FABRICANT:
Vita Research

Via Variante di Cancelliera, 4
00040 Ariccia (Rome) Italy



VitaResearch

DISTRIBUTEUR FRANCE :
Horus Pharma

148, av. G. Guynemer - Cap Var D2
06700 Saint-Laurent du Var
Tél. 04 93 19 54 03

